



# Control Inmunológico

*nivel 1*

Para el control de la precisión de métodos inmunoturbidimétricos

Lote: 1804251650

**APLICACIONES**

El **Control Inmunológico** está diseñado para ser usado para el control de la precisión de reactivos turbidimétricos. Consultar la tabla de valores asignados para los constituyentes, debido a que los mismos son lote específicos.

**REACTIVOS PROVISTOS**

**Control Inmunológico nivel 1:** suero humano inactivado con conservadores apropiados.

**INSTRUCCIONES PARA SU USO**

Los Reactivos Provistos son listos para usar.

**PRECAUCIONES**

El reactivo es para uso diagnóstico "in vitro". Evitar ingestión y contacto con la piel.

El Control ha sido preparado a partir de material no reactivo para HBsAg, HCV y HIV. Sin embargo debe manejarse como si se tratara de muestras infectivas.

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de química clínica.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

**ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

**Reactivo Provisto:** estable en refrigerador (2-10°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en el envase. Una vez abierto la estabilidad es de 45 días refrigerado (2-10°C).

**PRESENTACION**

- 1 x 1 mL (Cód. 1933261).

- 2 x 2 mL (Cód. 1933264).

**VALORES ASIGNADOS**

ANALITO	UNIDAD	KIT	VALOR MEDIO	RANGO	
$\alpha$ 1-Antitripsina	mg/dL	$\alpha$ 1-Antytripsin Turbitest AA	70.0	52.5	87.5
$\alpha$ 1-Glicoproteína	mg/dL	AGP Turbitest AA	38.7	31.0	46.4
$\alpha$ 2-Macroglobulina	mg/dL	$\alpha$ 2-Macroglobulin Turbitest AA	-	-	-
Antiestreptolisina O	UI/mL	ASO látex Turbitest AA	161	129	193
Cadena liviana kappa	mg/dL	$\kappa$ -Light Chain Turbitest AA	164	128	200
Cadena liviana lambda	mg/dL	$\lambda$ -Light Chain Turbitest AA	84.4	67.5	101.3
Ceruloplasmina	mg/dL	Ceruloplasmin Turbitest AA	12.8	9.9	15.7
Componente C3	mg/dL	C3 Turbitest AA	77.0	61.6	92.4
Componente C4	mg/dL	C4 Turbitest AA	17.5	13.1	21.9
Factor reumatoideo	UI/mL	FR látex Turbitest AA	52.0	41.6	62.4
Ferritina	ng/mL	Ferritin Turbitest AA	62.1	49.7	74.5
Haptoglobina	mg/dL	Haptoglobin Turbitest AA	57.6	46.1	69.1
Inhibidor de C1-esterasa	mg/dL	C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA	16.8	12.9	20.7
Inmunoglobulina A	mg/dL	IgA Turbitest AA	96.2	77.0	115.4
Inmunoglobulina G	mg/dL	IgG Turbitest AA	543	434	652
Inmunoglobulina M	mg/dL	IgM Turbitest AA	86.0	68.8	103.2
Prealbúmina	mg/dL	Prealbumin Turbitest AA	14.5	11.6	17.4
Proteína C reactiva	mg/L	PCR Turbitest AA	12.5	9.8	15.3
	mg/L	PCR ultrasensible Turbitest AA	14.3	11.2	17.4
	mg/L	CRP hs Turbitest AA	14.6	11.7	17.5
Transferrina	mg/dL	TRF Turbitest AA	114	91	137

# Símbolos


Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.



Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"



Elaborado por:

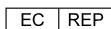

Representante autorizado en la Comunidad Europea



Nocivo



Uso diagnóstico "in vitro"



Corrosivo / Cáustico



Contenido suficiente para <n> ensayos



Irritante



Fecha de caducidad



Consultar instrucciones de uso



Límite de temperatura (conservar a)



Calibrador



No congelar



Control



Riesgo biológico



Control Positivo



Volumen después de la reconstitución



Control Negativo




Contenido



Número de lote



Número de catálogo

 Wiener Laboratorios S.A.I.C.  
Riobamba 2944  
2000 - Rosario - Argentina  
<http://www.wiener-lab.com.ar>  
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola  
Bioquímica  
Producto Autorizado A.N.M.A.T.  
Cert. N°: 3076/99



**Wiener lab.**

2000 Rosario - Argentina