



# Control Inmunológico

*nivel 1*

Lote kit: 1811285610  
Lote Control: 285610

Para el control de la precisión de métodos inmunoturbidimétricos

## APLICACIONES

El **Control Inmunológico** está diseñado para ser usado para el control de la precisión de reactivos turbidimétricos. Consultar la tabla de valores asignados para los constituyentes, debido a que los mismos son lote específicos.

## REACTIVOS PROVISTOS

**Control Inmunológico nivel 1:** suero humano inactivado con conservadores apropiados.

## INSTRUCCIONES PARA SU USO

Los Reactivos Provistos son listos para usar.

## PRECAUCIONES

El reactivo es para uso diagnóstico "in vitro". Evitar ingestión y contacto con la piel.

El Control ha sido preparado a partir de material no reactivo para HBsAg, HCV y HIV. Sin embargo debe manejarse como si se tratara de muestras infectivas.

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de química clínica.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

## ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

**Reactivo Provisto:** estable en refrigerador (2-10°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en el envase. Una vez abierto la estabilidad es de 45 días refrigerado (2-10°C).

## PRESENTACION

- 1 x 1 mL (Cód. 1933261).

- 2 x 2 mL (Cód. 1933264).


### VALORES ASIGNADOS

ANALITO	UNIDAD	KIT	VALOR MEDIO	RANGO	
$\alpha$ 1-Antitripsina	mg/dL	$\alpha$ 1-Antytripsin Turbitest AA	71,1	53,3	88,9
$\alpha$ 1-Glicoproteína	mg/dL	AGP Turbitest AA	45,1	36,1	54,1
$\alpha$ 2-Macroglobulina	mg/dL	$\alpha$ 2-Macroglobulin Turbitest AA	-	-	-
Antiestreptolisina O	UI/mL	ASO látex Turbitest AA	149	119	179
Cadena liviana kappa	mg/dL	$\kappa$ -Light Chain Turbitest AA	157	122	192
Cadena liviana lambda	mg/dL	$\lambda$ -Light Chain Turbitest AA	82,6	66,1	99,1
Ceruloplasmina	mg/dL	Ceruloplasmin Turbitest AA	10,7	8,2	13,2
Componente C3	mg/dL	C3 Turbitest AA	59,5	47,6	71,4
Componente C4	mg/dL	C4 Turbitest AA	15,5	11,6	19,4
Factor reumatoideo	UI/mL	FR látex Turbitest AA	57,6	46,1	69,1
Ferritina	ng/mL	Ferritin Turbitest AA	57,8	46,2	69,4
Haptoglobina	mg/dL	Haptoglobin Turbitest AA	61,5	49,2	73,8
Inhibidor de C1-esterasa	mg/dL	C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA	17,0	13,1	20,9
Inmunoglobulina A	mg/dL	IgA Turbitest AA	108	86	130
Inmunoglobulina G	mg/dL	IgG Turbitest AA	530	424	636
Inmunoglobulina M	mg/dL	IgM Turbitest AA	91,0	72,8	109,2
Prealbúmina	mg/dL	Prealbumin Turbitest AA	14,1	11,3	16,9
Proteína C reactiva	mg/L	PCR Turbitest AA	15,8	12,3	19,3
	mg/L	CRP hs Turbitest AA	16,6	13,3	19,9
Transferrina	mg/dL	TRF Turbitest AA	108	86	130

# Símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.

	Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"		Elaborado por:
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Nocivo
	Uso diagnóstico "in vitro"		Corrosivo / Cáustico
	Contenido suficiente para <n> ensayos		Irritante
	Fecha de caducidad		Consultar instrucciones de uso
	Límite de temperatura (conservar a)		Calibrador
	No congelar		Control
	Riesgo biológico		Control Positivo
	Volumen después de la reconstitución		Control Negativo
	Contenido		Número de catálogo
	Número de lote		

 Wiener Laboratorios S.A.I.C.  
Riobamba 2944  
2000 - Rosario - Argentina  
<http://www.wiener-lab.com.ar>  
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola  
Bioquímica  
Producto Autorizado A.N.M.A.T.  
Cert. N°: 3076/99



**Wiener lab.**

2000 Rosario - Argentina