



Proti U/LCR

Control - 2 niveles

Para control de precisión

Lote: 1603185340
Nivel 1: 185340
Nivel 2: 185340

APLICACIONES

Para estudio de precisión intralaboratorial en la determinación de proteínas en orina y líquido cefalorraquídeo utilizando el equipo de **Proti U/LCR** de Wiener lab.

REACTIVOS PROVISTOS

Control Nivel 1: solución conteniendo niveles de albúmina entre 25-75 mg/dL. Los valores son variables lote a lote.

Control Nivel 2: solución conteniendo niveles de albúmina entre 70-190 mg/dL. Los valores son variables lote a lote.

PRECAUCIONES

Los Reactivos son para uso diagnóstico "in vitro".

Los controles han sido examinados para antígeno de superficie del virus de hepatitis B (HBsAg), virus de la hepatitis C (HCV) y anticuerpos contra HIV 1/2, encontrándose no reactivos. No obstante, deben ser empleados como si se tratara de material infeccioso.

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Reactivos Provistos: listos para usar.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Reactivos Provistos: son estables en refrigerador (2-10°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS

Cualquier variación de los caracteres organolépticos de los controles, puede ser indicio de deterioro del mismo.

MATERIAL REQUERIDO (no provisto)

Ver manual de instrucciones de **Proti U/LCR** de Wiener lab.

PROCEDIMIENTO

Se deben emplear de la misma manera que una muestra desconocida, de acuerdo a las instrucciones que acompañan al equipo de **Proti U/LCR** de Wiener lab

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Ver manual de instrucciones de **Proti U/LCR** de Wiener lab.

PRESENTACION

- 2 x 3 mL (Cód. 1937003).

VALORES ASIGNADOS PARA TECNICA MANUAL Y ANALIZADORES

TECNICA / ANALIZADOR	NIVEL 1			NIVEL 2		
	VALOR MEDIO (mg/dL)	RANGO (mg/dL)		VALOR MEDIO (mg/dL)	RANGO (mg/dL)	
Konelab Series / Wiener lab, CT Series	29,2	23,4	35,1	105	84	126
Metrolab 2300 plus / Wiener lab. CM Series	34,7	27,8	41,7	105	84	126
Selectra 1 / 2 / E	34,4	25,8	43,0	100	80	120
Targa BT 3000	34,4	25,8	43,0	100	75	125
BT 3000 plus / Wiener lab. CB Series	34,4	25,8	43,0	100	75	125
Wiener lab. CMD Series	33,5	26,8	40,2	107	85	128
Técnica Manual	36,1	27,1	45,1	108	81	135

Símbolos


Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.



Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"



Elaborado por:

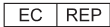

Representante autorizado en la Comunidad Europea



Nocivo



Uso diagnóstico "in vitro"



Corrosivo / Caústico



Contenido suficiente para <n> ensayos



Irritante



Fecha de caducidad



Consultar instrucciones de uso



Límite de temperatura (conservar a)



Calibrador



No congelar



Control



Riesgo biológico



Control Positivo



Volumen después de la reconstitución



Control Negativo




Contenido



Número de lote



Número de catálogo

 Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Riobamba 2944
2000 - Rosario - Argentina
<http://www.wiener-lab.com.ar>
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola
Bioquímica
Producto Autorizado A.N.M.A.T.
Cert. N°: 4577/02



Wiener lab.

2000 Rosario - Argentina