



Proti U/LCR

Control - 2 niveles

Para control de precisión

Lote: 1604188440
Nivel 1: 188440
Nivel 2: 188440

APLICACIONES

Para estudio de precisión intralaboratorial en la determinación de proteínas en orina y líquido cefalorraquídeo utilizando el equipo de **Proti U/LCR** de Wiener lab.

REACTIVOS PROVISTOS

Control Nivel 1: solución conteniendo niveles de albúmina entre 25-75 mg/dL. Los valores son variables lote a lote.

Control Nivel 2: solución conteniendo niveles de albúmina entre 70-190 mg/dL. Los valores son variables lote a lote.

PRECAUCIONES

Los Reactivos son para uso diagnóstico "in vitro".

Los controles han sido examinados para antígeno de superficie del virus de hepatitis B (HBsAg), virus de la hepatitis C (HCV) y anticuerpos contra HIV 1/2, encontrándose no reactivos. No obstante, deben ser empleados como si se tratara de material infeccioso.

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Reactivos Provistos: listos para usar.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Reactivos Provistos: son estables en refrigerador (2-10°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS

Cualquier variación de los caracteres organolépticos de los controles, puede ser indicio de deterioro del mismo.

MATERIAL REQUERIDO (no provisto)

Ver manual de instrucciones de **Proti U/LCR** de Wiener lab.

PROCEDIMIENTO

Se deben emplear de la misma manera que una muestra desconocida, de acuerdo a las instrucciones que acompañan al equipo de **Proti U/LCR** de Wiener lab

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Ver manual de instrucciones de **Proti U/LCR** de Wiener lab.

PRESENTACION

- 2 x 3 mL (Cód. 1937003).

VALORES ASIGNADOS PARA TECNICA MANUAL Y ANALIZADORES

TECNICA / ANALIZADOR	NIVEL 1			NIVEL 2		
	VALOR MEDIO (mg/dL)	RANGO (mg/dL)		VALOR MEDIO (mg/dL)	RANGO (mg/dL)	
Konelab Series / Wiener lab, CT Series	29,4	23,5	35,2	105	84	126
Metrolab 2300 plus / Wiener lab. CM Series	35,8	28,6	42,9	105	84	126
Selectra 1 / 2 / E	35,6	26,7	44,5	103	82	124
Targa BT 3000	35,6	26,7	44,5	103	77	129
BT 3000 plus / Wiener lab. CB Series	35,6	26,7	44,5	103	77	129
Wiener lab. CMD Series	33,5	26,8	40,2	107	86	128
Técnica Manual	36,6	27,4	45,7	108	81	135

Símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.



Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Uso diagnóstico "in vitro"



Contenido suficiente para <n> ensayos



Fecha de caducidad



Límite de temperatura (conservar a)



No congelar



Riesgo biológico



Volumen después de la reconstitución



Contenido



Número de lote



Elaborado por:



Nocivo




Corrosivo / Cáustico



Irritante



Consultar instrucciones de uso

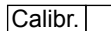

Calibrador



Control




Control Positivo



Control Negativo



Número de catálogo

 Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Riobamba 2944
2000 - Rosario - Argentina
<http://www.wiener-lab.com.ar>
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola
Bioquímica
Producto Autorizado A.N.M.A.T.
Cert. N°: 4577/02



Wiener lab.

2000 Rosario - Argentina